

SE BEBER NÃO DIRIJA

O etilômetro modelo AT-198 deve ser usado apenas como um indicador da possível presença de álcool no sopro. Não confiar nele como única base para indicar a intoxicação ou se você está seguro para dirigir um veículo, operar equipamento ou envolver-se em atividades perigosas. Cada pessoa responde de forma diferente ao consumo de álcool e o resultado do teste é apenas uma referência, não é um padrão para ser tomado como base para uma decisão. Este produto não deve ser utilizado como uma ferramenta para determinar se uma pessoa está apta para operar um veículo motorizado de forma legal ou com segurança. A ingestão de qualquer quantidade de álcool diminuirá os reflexos e julgamento para operar um veículo motorizado.

Principais características:

- * Avançado sensor de álcool com superfície plana
- * Resposta rápida e excelente precisão
- * Controle da unidade de micro ship (MCU) inteligente
- * Indicação do teste direto no visor de LCD
- * Indicação no visor de LCD com palavras padrões com luz de fundo.
- * Design moderno
- * Higiênico, pois não é necessário tocar com a boca para soprar.
- * Aviso visual e sonoro além do limite pré-ajustado
- * Indicação de bateria fraca e dispositivo para poupar energia

Características técnicas:

Sensor de álcool com superfície plana

Faixa de detecção: 0,00 – 0,20% BAC

0,00 – 2,00‰ BAC

0,00 – 1,00 mg/l

0,00 – 2,00 g/l

Precisão: ±10% (Escala cheia - FS)

Nível do pré-ajuste: 0,1 mg/l

0,3 mg/l

Tempo para aquecimento: 18 em contagem regressiva

Tempo de teste: < 8seg.

Visor: LCD com 3 digitais

Energia: DC3V – 2 pilhas AAA

Ambiente de trabalho: temp.: 10 a 50°C e

Umid. relativo do ar <95% (sem condensar)

Dimensões: 102mm x 37mm x 20mm

Peso: 50g

Indicações

0.00 mg/l Quantidade de álcool contido no sopro.


Wait Esta em aquecimento, favor aguardar.

 Pilha fraca, favor trocar.

O etilômetro "ALC Nose" pode detectar facilmente álcool no sopro. Se você estiver com excesso de álcool o etilômetro avisará com áudio além do limite pré-ajustado.

Instruções de operação

1. Retirar a tampa no compartimento das pilhas. Inserir as pilhas, favor verificar a polaridade das pilhas, pois caso contrário pode danificar o aparelho e fechar cuidadosamente.
2. Pressionar o botão de energia por 1seg., a lâmpada de fundo irá acender, com um breve sinal piscara "Wait" (esperar) e em contagem regressiva partindo de 18 irá aquecer (quando não for usando por muito tempo a contagem regressiva é mais lenta), antes de desaparecer "Wait", "C" e "blow" (soprar) informará para você fazer o teste.

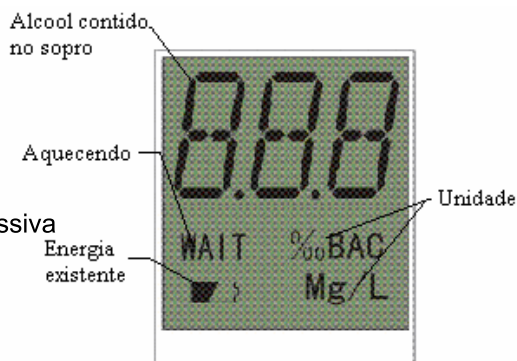

3. Soprar dentro do absorvedor de sopro, quando o “C” aparecer favor efetuar um sopro bem profundo diretamente no absorvedor de sopro entre 3 a 4 segundos, não pare antes de ouvir o sinal sonoro. Dentro de um intervalo de 3 a 4 seg. antes de você ver piscar “0.00” e “Blow” desaparecer, também haverá um sinal sonoro ao mesmo tempo.
4. Após o sopro leia o resultado no visor de LCD que fornecerá para você a quantidade de álcool que esta no sopro, o resultado permanecerá na tela por 8 segundos, com um sinal sonoro o etilômetro cortará o fornecimento de energia automaticamente.
5. Se for necessário efetuar um novo teste, favor pressionar o botão de energia outra vez e seguir os passos acima.
6. **O ETILÔMETRO É PROJETADO COMO UM AUXÍLIO. ELE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO UMA FERRAMENTA PARA DETERMINAR SE VOCÊ OU OUTRA PESSOA PODE OPERAR UMA MÁQUINA OU UM VEÍCULO MOTORIZADO, O FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NÃO SE RESPONSABILIZA DE FORMA ALGUMA PELO USO DESTES PRODUTOS COM ESTA FINALIDADE. O ETILÔMETRO NÃO FAZ ABSOLUTAMENTE NENHUMA REFERÊNCIA AO CONTEÚDO DE ÁLCOOL NO SANGUE OU OUTRAS MEDIDAS DE INTOXICAÇÃO PROMULGADA PELO GOVERNO, OU OUTRAS AGENCIAS DE SAÚDE OU MEDICAS. OS RESULTADOS BAC DO ETILÔMETRO SÃO APENAS PARA REFERÊNCIA, E O FABRICANTE OU IMPORTADOR NÃO ASSUMEM POR ESTA RAZÃO RESPONSABILIDADE LEGAL PARA OS RESULTADOS.**

Notas 1

1. Evitar batidas e quedas do etilômetro. Conservar cuidadosamente na sua caixa.
2. Não limpe com nenhum agente de limpeza. A alta concentração de álcool poderá alterar os testes normais
3. Para assegurar o correto resultado do teste, favor aguardar 20 minutos após ter ingerido álcool.
4. Ao guardar o etilômetro não deixe-o junto com gás a gressivo (como exemplo gás de cloro)
5. O tempo de vida do sensor é de aproximadamente 2 anos para um ambiente normal de operação.
6. Para assegura-se da acuidade do etilômetro favor comparar com um padrão certificado a cada 3 meses.
7. Quando for usar após um longo período sem uso ou efetuado um teste com alta concentração de álcool, o aquecimento deve ser repetido. Se não for possível realizar o teste é porque o etilômetro necessita de nova calibração.

Notas 2

BAC: Concentração de álcool no sangue
 mg/l: miligrama por litro do sopro
 g/l: grama por litro de sangue

Falhas comuns e soluções

Descrição das Falhas	Possível Razão da Falha	Soluções Possíveis
Visor de LCD não funciona	Instalação errada	Instalar as pilhas com a polaridade correta.
	Pilha fraca	Colocar baterias novas.
	Falha no circuito	Contatar a loja ou a assistência técnica mais próxima.
Não informa o nível de álcool	Tempo de regressou não termina	Aguardar o término do tempo de regressão.
	Falha no circuito	Contatar a loja ou a assistência técnica mais próxima.

Garantia do produto contra defeitos de fabricação: 12meses (não violar o equipamento)
 Fabricado na China

Importado por:

Brasil Mundi Importação e Exportação Ltda. - CNPJ: 07.240.177/0001-04-Av. Rio Branco, 847 sala 1109 - Florianópolis - SC

Adquirido e distribuído por:



CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santa Catarina, 1481 – Estreito - Florianópolis – SC – CEP: 88075-500

Fone/Fax: (48) 3248-2828 | (11) 4063-0023 | (31) 4063-9244 - CNPJ.: 78.515.210/0001-00

E-mail: bioland@controller-sc.com.br - Site: www.biolandbrasil.com.br