

Especificações sobre a Auto lanceta



Introdução: Auto lanceta

Modelo: Lanceta Autoretrátil

Material: A auto lanceta é feita de polietileno (base), ABS (tampa) e agulha primavera com ponta trifacetada (65mm) de aço inoxidável 304.

Dimensões:

Modelo	Comprimento total	Base	Tampa
SB	5 cm	3,5 cm	1,5 cm

Especificação	Cor	Comprimento da agulha	Diâmetro da agulha	Profundidade da agulha
21G	Amarelo	22.55±0.1mm	0.82±0.01	2.2mm/Fluxo alto
23G	Verde	22.55±0.1mm	0.66±0.01	2.2mm/Fluxo médio
28G	Lilás	22.45±0.1mm	0.36±0.01	1.8mm/Fluxo baixo
30G	Rosa	22.45±0.1mm	0.30±0.01	1.5mm/Fluxo baixo

- Instruções:**
- 1: Gire a tampa até que o plástico se rompa. Retire a parte plástica.
 - 2: Escolha o local a ser perfurado. Pressione a auto lanceta de forma firme.
 - 3: Coloque a tampa protetora e descarte a auto lanceta na caixa apropriada.

Validade: A Auto lanceta funcionará de forma eficaz por um período de cinco anos após a esterilização.

Esterilização: EO Gas

Utilização: A auto lanceta é utilizada para obter amostra de sangue capilar para teste em hospitais ou monitoramento da glicose no sangue.

Condições de armazenagem: A Auto lanceta precisa ser armazenada em um ambiente limpo e ventilado, mantendo nas seguintes condições: temperatura 0-40°C; humidade relativa do ar 0-80%; pressão 1 kPa.

Embalagem: Contem 100 auto lancetas em uma caixa.

Atenção! Este produto é para uso em uma única vez e somente por uma pessoa. Utilizar dentro da validade.